

直接贴在皮肤上可感受到逐渐扩散的暖意



申请编号
S码：09B2X10012000051
M码：09B2X10012000050

禁止二次使用

Heating device Jikabari®

商品的特点

- 本品发热至40° C左右，能够持续6小时，是可以轻松获得【温热效果】的医疗器械。
- 发热片采用双发热点设计，温热范围更广，触感柔软且完全贴合身体线条。
- 通过温热效果改善患部的血液循环，缓解肌肉疼痛、神经痛以及肌肉疲劳、肌肉紧张等。

禁止事项

- 下列人群请勿使用。
 - (1) 因挫伤、扭伤等患部发热的人。
 - (2) 无法自行撕除本品的人。
 - (3) 手脚血液循环较弱的人。
 - (4) 糖尿病患者（可能会存在难以察觉热量而造成低温灼伤的风险）。
- 请勿用于以下部位。
 - (1) 粘膜。
 - (2) 湿疹、接触性皮炎、伤口。
 - (3) 脸部。
 - (4) 涂抹了药物的部位。
- 温热片用完即弃，请勿二次使用。

【使用方法】 将本品贴于患部，每天1次，不可超过6小时。



请勿连续
使用6小时
以上



睡觉时请
勿使用。



贴上本品后请
勿用皮带、皮包等
压迫本品

【功能、效果】 温热效果

1. 促进血液循环
2. 消除肌肉疲劳
3. 松弛肌肉紧张
4. 缓解神经痛、肌肉疼痛的痛感
5. 活跃肠胃作用
6. 从疲劳状态恢复活力

⚠ [使用上的注意事项]

諮詢事項

1. 以往对药物或化妆品等有过敏史的人（例如发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎等），请咨询医生或药剂师。
2. 使用后出现下列症状时，请立即停止使用，请咨询医生或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	发疹与发红、瘙痒、接触性皮炎、刺激感、低温灼伤、皮肤脱落

【形状、结构】



【使用上的注意事项】

1. 睡觉时请勿使用本品。
2. 贴上本品后，请勿用护具和皮带等压迫本品。另外，贴上本品后，如果保持患部朝下的状态就寝或就座等也会对本品造成强烈压迫，容易引起低温灼伤，还请注意。
3. 为防止温度过高，请勿在盖着棉被、毯子的状态下或者在被炉中等保温性高的状态下使用。
4. 感觉到温度过高等异常情况时，请立即剥除本品。此外，请慢慢将本品剥开以防止皮肤因被低温灼伤而脱落。
5. 当本品贴在臀部等身体较不敏感的部位时，特别容易造成低温灼伤，还请注意。
6. 皮肤特别敏感脆弱的人请勿连续贴在同一个地方。

【其他注意事项】

1. 请勿搓揉、强行弯折或者破坏发热片。
2. 万一皮肤直接接触到发热片内的物质时，请用湿毛巾抹去或用水冲洗。
3. 请勿舔或食用本品。
4. 请勿用水等弄湿本品。洗澡前请务必将本品剥除。

【发热的原理】

本品是以盐类为催化剂，通过铁和空气中的氧的氧化反应而产生热量的发热片。

【存放时的注意事项】

1. 请保管在阴凉处，避免阳光直射。
2. 请将本品放在儿童接触不到的地方。
3. 内袋一旦开封，本品即会自行发热。如提前开封可能会出现在需要使用时发现本品已丧失发热功能的情况，还请于用前开封。
4. 发热片用毕后，请待其完全冷却，然后按照市区町村的要求分类丢弃。

【包装】S码 (6cm × 12cm).....6片装、12片装

M码 (8.4cm × 13cm).....4片装、8片装