

直接貼在皮膚上可感受到逐漸擴散的暖意



申請編號
S尺寸：09B2X10012000051
M尺寸：09B2X10012000050

禁止二次使用

Heating device Jikabari®

商品的特點

- 本品發熱至40°C左右，能夠持續6小時，是可以輕鬆獲得【溫熱效果】的醫療器械。
- 發熱片採用雙發熱點設計，溫熱範圍更廣，觸感柔軟且完全貼合身體線條。
- 通過溫熱效果改善患部的血液循環，緩解肌肉疼痛、神經痛以及肌肉疲勞、肌肉緊張等。

❌ 禁止事項

1. 下列人群請勿使用。
 - (1) 因挫傷、扭傷等患部發熱的人。
 - (2) 無法自行撕除本品的人。
 - (3) 手腳血液循環較弱的人。
 - (4) 糖尿病患者（可能會存在難以察覺熱量而造成低溫灼傷的風險）。
2. 請勿用於以下部位。
 - (1) 黏膜。
 - (2) 濕疹、接觸性皮炎、傷口。
 - (3) 臉部。
 - (4) 塗抹了藥物的部位。
3. 溫熱片用完即丟，請勿二次使用。

【使用方法】將本品貼於患部，每天1次，不可超過6小時。



請勿連續使用
6小時以上



睡覺時請勿
使用。



貼上本品後
請勿用皮帶、
皮包等壓迫本品

【功能、效果】 溫熱效果

1. 促進血液循環
2. 消除肌肉疲勞
3. 鬆弛肌肉緊張
4. 緩解神經痛、肌肉疼痛的痛感
5. 活躍腸胃作用
6. 從疲勞狀態恢復活力

⚠️ [使用上的注意事項]

👤 諮詢事項

1. 以往對藥物或化妝品等有過敏史的人（例如發疹與發紅、搔癢、接觸性皮炎等），請諮詢醫生或藥劑師。
2. 使用後出現下列症狀時，請立即停止使用，諮詢醫生或藥劑師。

相關部位	症狀
皮膚	發疹與發紅、搔癢、接觸性皮炎、刺激感、低溫灼傷、皮膚脫落

【形狀、結構】



【使用上的注意事項】

1. 睡覺時請勿使用本品。
2. 貼上本品後，請勿用護具和皮帶等壓迫本品。另外，貼上本品後，如果保持患部朝下的狀態就寢或就座等也會對本品造成強烈壓迫，容易引起低溫灼傷，還請注意。
3. 為防止溫度過高，請勿在蓋著棉被、毯子的狀態下或者在被爐中等保溫性高的狀態下使用。
4. 感覺到溫度過高等異常情況時，請立即撕除本品。此外，請慢慢將本品撕開以防止皮膚因被低溫灼傷而脫落。
5. 當本品貼在臀部等身體較不敏感的部位時，特別容易造成低溫灼傷，還請注意。
6. 皮膚特別敏感脆弱的人請勿連續貼在同一個地方。

【其他注意事項】

1. 請勿搓揉、強行彎折或者破壞發熱片。
2. 萬一皮膚直接接觸到發熱片內的物質時，請用濕毛巾抹去或用水沖洗。
3. 請勿舔或食用本品。
4. 請勿用水等弄濕本品。洗澡前請務必將本品撕除。

【發熱的原理】

本品是以鹽類為催化劑，通過鐵和空氣中的氧的氧化反應而產生熱量的發熱片。

【存放時的注意事項】

1. 請保管在陰涼處，避免陽光直射。
2. 請將本品放在兒童接觸不到的地方。
3. 內袋一旦開封，本品即會自行發熱。如提前開封可能會出現在需要使用時發現本品已喪失發熱功能的情況，還請於用前再開封。
4. 發熱片用畢後，請待其完全冷卻，然後按照各鄉鎮的分類要求丟棄。

【包裝】S尺寸 (6cm × 12cm).....6片裝、12片裝

M尺寸 (8.4cm × 13cm).....4片裝、8片裝